

| | Diesen Knopf zum Start der Sonde drücken bis die LED blau leuchten Bitte beachten Sie: wenn das App auf 2 Geräten aktiviert ist, zB Handy und Tablett oder Tablett und PC so müssen sie an dem Gerät das Sie nicht benutzen das WLAN ausschalten. Sonst Keine Verbindung |
|--|--|
| Eppich Medphys 0664 449515C5-2Fs ABD 10/02/2018 17:36:21 🥱 🤨 🌣 🖵 Th | 2., Das App im Computer |
| Image: Pred Stars MHz DR 75 AP 82% MI 0.4 TIS 0.1 DR 75 Image: Pred Stars MHz DR 75 Image: Pred Stars MHz DR 75 Depth 16.0 Image: Pred Stars MHz DR 75 Image: Pred Stars MHz DR 75 Function Mode Image: Pred Stars MHz DR 75 Image: Pred Stars MHz DR 75 Function Mode Image: Pred Stars MHz DR 75 Image: Pred Stars MHz DR 75 Image: Pred Stars MHz DR 75 | starten Das WIFI Zeichen anklicken |
| Wireless Probe Manager 💿 🤝 🗘 Thumbnails | 3., Mit Connect die Sonde mit |
| 40 × 40 | dem App verbinden und warten bis die unterschiedlichen |
| Wireless Probe List: Exam Mode | Presets erscheinen. |
| Probe SSID Signal Quality Status Orthopedic v/ * *D002* 98% Connected Nerve #5 | Sollte dies zu lange dauern mit |
| MSK * | retresn versucnen Bitte beachten Sie: wenn das |
| Small Parts Carotid +: | App auf 2 Geräten aktiviert ist, |
| VAS · | zB Handy und Tablett oder |
| ABD · | Tablett und PC so müssen sie |
| GYN *15 08 | benutzen das WLAN |
| Connect successfully! | ausschalten. |
| Refresh Disconnect OK Cosifion 7 | Sonst Keine Verbindung Sonde erscheint nicht!!! |

Kaltenbachweg 33, FAX: 0720 3030374 Ktn:00006053342; UID: ATU66885579;



| Eppich Medphys 0664 4495 [B] Freq 6.0 MHz AP 82% | i15L11-4Ks Small 10/02/2018 17:47:37 MI 0.2 TIS 0.1 | | r 9 | ٥ | ₽ | Thumbnails | 4., Mit dem Schall beginnen. |
|--|--|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|--|
| DR 75 Gain 56 FrameRate 17 Depth 3.9 | | | | | - ▲ | | In der untersten Zeile können einzelne Parameter verstellt werden. zB.: Gain: Verstärkung anklicken und einfach auf einen punkt klicken, der Wert verändert sich in der Mitte ist ein B: durch |
| Function Mode B | | | | ••••• | • | v A A t | klicken auf diesen Punkt können weitere Parameter geöffnet werden |
| S6 3 | 6.0 MHz B 75 Focus Polition | <u>Gray N</u> 13 | <u>nap</u> | 0 | | | 3 x klicken: wieder erstes Bild |
| Eppich Medphys 0664 4499 [B] Freq 6.0 MHz AP 82% DR 75 Gain 56 FrameRate 17 Depth 3.9 | M15L11-4Ks Small 10/02/2018 17:48:14 MI 0 2 TIS 0.1 | | 6 | ¢ • • • • | P | Thumbnails | Veränderung der Frequenz: Frequenz anklicken und danach auf die gewünschte Frequenz klicken. |
| | | | | | | | Normalfrequenz: 6.0, 7.5, 8.0 MHz für mehr Eindringtiefe |
| | | | | | • | | THI: H9.0; bis 4 CM H10.0, H11.0 bis 2 cm |
| 6.0 MHz 7.5 MHz 8.0 N | IHz H9.0 MHz H10.0 MHz H11.0 MHz | | | | | * * 前 せ | Dyn: mehr Kontrast bei 105 |
| Gein Depth3 | Freq a. Knay 75 Focus Position | Gray M | lap | 0 | | * | GSC: Graustufen: 1 hell 13 und mehr kontrastreich, dunkel |
| Setup Hospital Inform System Preset Exam Preset Name Local Net | nation General Measure Biopsy Eppich Medphys 0664 4495158 | | 9 | ¢ • • | P | Thumbnails | 5., Drücken des Steuerrades: hier kann man Steueroptionen öffnen. |
| DICOM Local Address DICOM Server DICOM Service | Kaltenbachweg 33 8075 Hart bei Graz | | | | | | Hier können Arbeitsabläufe mit den Presets fixiert werden |
| System Update Exit Telephone Website | | | | | • | | Presets eingestellt werden |
| Departmer | | | | | 4 | V A 🔒 🖞 | Dicom Einstellungen: Das System unterstützt DICOM |
| | | Apply | , | 0 | | * | |

Kaltenbachweg 33, FAX: 0720 3030374 Ktn:00006053342; UID: ATU66885579;



| Setup | | 🕽 🚸 📮 Thumbnails | 6 Evam Preset: |
|---------------|---|------------------|----------------------------------|
| System Preset | Exam Selection | | Durch anstauern eines Presets |
| Exam Preset | Probe L11-4Ks V | • | Durch ansteuern eines Presets |
| Image Preset | | • | und drücken default wird das |
| Local Net | Exam Selected | | gewünschte Preset an erste |
| DICOM Local | Orthopedic | +1 | Stelle gesetzt. |
| DICOM Server | Nerve | | So kann für jede Sonde die |
| DICOM Service | MSK. | · · · | |
| System Update | Smail Parts | ÷2 | Einstellung nach den |
| Exit | | | Arbeitsvorgängen eingestellt |
| | | | werden |
| | Default | \$ 3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Q ® | |
| | | | |
| | | | |
| Setup | | 🕽 🔅 🖵 Thumbnails | 7., Hier können Presets vorab |
| System Preset | Exam Mode Small Parts 🗸 | | eingestellt werden. |
| Exam Preset | B&THI M Color Power PW | • | Ū. |
| Image Preset | Small Parts All Probes | | Wann innorhalb ainar |
| Dicolul acal | Colorize Map Off V 151 General V | | |
| DICOM Server | A.power 82% V 💿 TIS 💿 TIB | • | Untersuchung eine |
| DICOM Service | Probe L11-4Ks 🗸 | | Verbesserung der Einstellung |
| System Update | | • | erfolgt kann dies direkt mit dem |
| Exit | Depth 3.9cm V Freq H9.0 M.,, V Focus Positi 3.0cm V | | Europhic and anklicken SAVE |
| | R Gain 60 V THI Gain 75 V L/R Flip | • | |
| | Com C | • | PARAMETER direkt gespeichert |
| | Dyn Range 105 🗸 THI Dyn Ra. 75 🗸 | • | werden |
| | B Gray Map Gray M V THI Gray Map Gray M V U/D Flip | | |
| | Persistence 3 V THI Persistence 3 V | · · · · · | |
| | CrossBeam On 👽 Enhance 1 👽 | | |
| | | | |
| | Apply | | |
| | | | |
| Setup | | 🕽 🔅 📮 Thumbnails | 8., Dicom: |
| System Preset | Storage Print Worklist | | Hier kann sowohl eine Worklist |
| Exam Preset | Configure the New Service | • | wie auch die Speicherung der |
| Image Preset | Device Service name | • | wie auch die Speicherung der |
| Local Net | AE Tide Port 104 | : | Patienten eingestellt werden |
| DICOM Local | | •1 | |
| DICOM Server | Add Cancel Update | | |
| DICOM Service | | | |
| System Update | Device Service name AE Title Port Default | +2 - | |
| Exit | | × . | |
| | | | |
| | | •3 | |
| | | • | |
| | | · · · · | |
| | Delete Default Verify Verify Indo | | |
| | teny entry onde. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kaltenbachweg 33, FAX: 0720 3030374 Ktn:00006053342; UID: ATU66885579;



| Eppich Medphys 0664 449515L11-4Ks Small 10/02/2018 17:51:14 📼 穼 📀 🔅 🖵 Thumbnails | 8., Funktion: |
|---|-------------------------------|
| [B] Freq 6.0 MHz AP 82% MI 0.2 TIS 0.1 | Info: einen neuen Patienten |
| DR 75 Gain 56 | eingeben |
| Depth 3.9 | Save: Bilder werden |
| • •1 | gespeichert |
| | SAVE Parameter: neue |
| | Finstellungen können |
| +2 • | gespeichert werden |
| | MEASURE: bior könnon in nach |
| • \$3 | Prosots uptorschiedliche |
| | Massurgen durch soführt |
| | |
| | werden (Blasenvolumen, |
| | Huftwinkel nach Graf) |
| 8 Info 🖺 Save Save Param 🕞 🍾 Measure 🕼 Clear All 😰 Zoom 🧿 🛞 | Zoom: Hier öffnet sich das |
| | Zoombild mit Detailbild links |
| Pattent Info | 9., Patienteneingabe: durch |
| First Name 4 | drücken Funktion – Info |
| Patient ID | erscheint das Patienten |
| Gender Unknown M.I. | Eingabefeld. |
| DOS dd/mm/yyyy Age Vears . | |
| ABD OB GYN CARD Small Parts | |
| Study Description | |
| Primary Indications . | |
| Secondary Indications +3 | |
| Height cm | |
| Weight kg | |
| New Patient New Exam Cancel Exam Patient List WorkList | |
| OK Cancel | |
| | |
| Eppich Medphys 0664 449515L11-4Ks Small 10/02/2018 17:53:49 📼 🗢 🖸 🌣 🖵 TGC 💿 | 10., Zoom: Links unten ein |
| Freq H10.0 MH AP 82% MI 0.2 TIS 0.1 DR 105 | Detailbild durch drücken +/- |
| Gain 50 FrameRate 13 | kann der Zoom vergrößert oder |
| Zoom 1.8 | verkleinert werden |
| | |
| | Mit dem Trackball kann das |
| | Zoomfeld in gewünschte |
| | Position gebracht werden |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Function Mode B | |
| Gain Depth Freq B) Dyn Renge Focus Position Gay Map O 50 3 H10.0 MH 105 Focus Position 13 O | |
| | |

Kaltenbachweg 33, FAX: 0720 3030374 Ktn:00006053342; UID: ATU66885579;



| 🟶 📖 🗢 🙆 👛 🗖 Thumbnails | 11 Made 2 D Dild |
|--|-----------------------------------|
| Eppich Medphys 0664 449515L11-4Ks Small 10/02/2018 17:54:51 | |
| Freq H10.0 MH AP 52% MI 0.2 HS 0.1 DR 105 * | Mit der Maus können die CINE |
| Gain 50 · FrameRate 13 · | Loops Bilder einzeln abgerufen |
| Depth 3.9 | werden |
| 10 eL | |
| | auf dor Maus auf das Pad |
| | |
| 2.6 42 | Drucken: Cursor erscheint und |
| | steht für Anwahl einer Option |
| | zur Verfügung |
| 239 (4) (| Mit Cursor auf 2B klicken: |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | aktives Bild wechselt |
| | Auto Play: Absnielan das Cina |
| Function Mode 8 Cine 28 | Auto Play. Abspielen des cine |
| | Loops, Geschwindigkeit |
| Save Grite X 0 Off Cine | einstellen |
| | Mode B: EInzelbild |
| Eppich Medphys 0664 449515L11-4Ks Small 10/02/2018 17:54:51 🗢 🗢 🕤 🌣 🖵 Thumbnails | 12., Funktion 2te Seite: |
| [B2] Freq H10.0 MH AP 82% MI 0.2 TIS 0.1 | Kommentar oder Body Mark |
| DR 105 + Gain 50 + | einfügen |
| FrameRate 13 . Depth 3.9 . | ennugen |
| | |
| | |
| | |
| 24 42 | |
| | |
| | |
| 3.4 | |
| | |
| | |
| Departice Mode 9 Cites 39 | |
| | |
| 🛿 Comment: 💢 (Body Mark 😝 Patient List 🔎 🖬 Report: 🖉 arrow 🔘 🔘 | |
| В | |
| Eppich Medphys 0664 449515L11-4Ks Small 10/02/2018 17:57:30 📼 💌 🕢 🔅 📮 Thumbnails | 13., Biopsy: für die Sonden sind |
| Biopsy AP 82% MI 0.2 TIS 0.1 | auch Bionsy Halter verfüghar |
| Bracket CCI | Hier individuelle Finstellung des |
| Guideline All | Rionsy kits |
| Dot Size Med | ыоруу киз |
| Verify •1 | |
| Biopsy Verify | |
| Guideline All | |
| Postion | |
| Anale | |
| • • • | |
| Load Factory | |
| Cara Esta | |
| | |
| Function Mode B | |
| Colorize Map | |
| on the second seco | |

Kaltenbachweg 33, FAX: 0720 3030374 Ktn:00006053342; UID: ATU66885579;





Eppich Medphys & Wellness e.U.

Mobil: +43 (0) 664 449 51 58; Steiermärkische Sparkasse; Blz: 20815; IBAN: AT962081500006053342; Kaltenbachweg 33, FAX: 0720 3030374 Ktn:00006053342; UID: ATU66885579;